

Prontosan® Întrerupe Ciclul Biofilmului

O abordare proactivă utilizând o strategie combinată din Prontosan® Soluție și Prontosan® Wound Gel / Wound Gel X ca parte a pregătirii patului plăgii, cu scopul de a:

- Reduce biofilmul (**Prontosan® Soluție**)
- Preveni reapariția biofilmului (**Prontosan® Wound Gel / Wound Gel X***)

Îngrijirea adecvată în funcție de stadiul plăgii

PLAGĂ CRONICĂ – EPITELIALIZARE

Clătiți-umeziți-clătiți

- Fără biofilm
- Exudat scăzut
- Țesut epitelial foarte fragil



- Curăță plaga
- Previne biofilmul



PLAGĂ CRONICĂ – GRANULAȚIE


Clătiți-umeziți-clătiți
cu Prontosan soluție

Aplicați
Gel / Gel X*

- Biofilm puțin
- Exudat scăzut/mediu



- Îndepărtează mecanic detritusul și biofilmul
- Promovează vindecarea plăgii

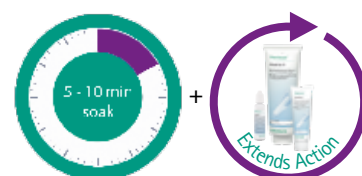

PLAGĂ CRONICĂ – EXUDAT/COLONIZARE/INFECȚIE


Clătiți-umeziți-clătiți
cu Prontosan soluție

Aplicați
Gel / Gel X*

- Biofilm
- Exudat mediu/crescut
- Plagă stagnantă



- Îndepărtează mecanic detritusul și biofilmul
- Promovează vindecarea plăgii
- Reduce mirosul neplăcut din plagă

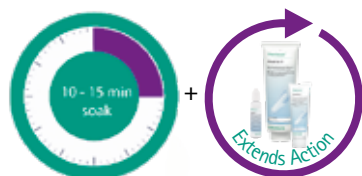

* Aplicați Prontosan® Gel în plăgi cavitare, Prontosan® Wound Gel X în plăgile cu suprafață mare

Compatibil cu majoritatea tipurilor de pansamente.

De la deschidere, Prontosan® Soluție și Prontosan® Wound Gel / Wound Gel X poate fi utilizat până la 8 săptămâni (pe un singur pacient).