


Mini-Spike® 2 Chemo

Eficiență dovedită în practica clinică.

Evitarea riscurilor în timpul preparării medicamentelor periculoase.

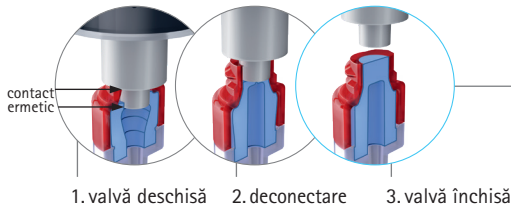

**CLOSED
SYSTEM**

I EFICACITATEA BARIEREI MICROBIENE
Valva Safeflow a Mini-Spike® 2 Chemo conectată cu o seringă este o barieră microbiană eficientă.

Universitätsklinikum Bonn IHPH
Abstract report 2014-069, 02.2015

II
Valvele Safeflow sunt asamblate conform procedurilor de control al riscurilor din domeniul îngrijirilor medicale. Acestea au termen de valabilitate de 5 ani și pot fi accesate cu conectori standard Luer Lock.

B. Braun, SafeFlow – Evaluarea termenului de valabilitate al portului de acces.

III SISTEM ÎNCHIS
Mini Spike 2 Chemo este un dispozitiv de transfer cu "sistem închis" conform recomandărilor NIOSH (Institutul Național pentru Securitate și Sănătate în Muncă al USA) deoarece previne evacuarea contaminanților periculoși (cum ar fi medicamente toxice) în mediul adiacent.


Quality Labs
Abstract report 1816.4, 04.2016

IV STERILITATEA MICROBIANĂ A SOLUȚIEI
Mini-Spike® 2 Chemo menține sterilitatea unei soluții reconstituite pentru o perioadă de până la 14 zile chiar și atunci când este utilizat în mod repetat și când este expus la încălzirea bacteriană ridicată în aer.


Quality Labs
Abstract report 2710, 02.2017



0.2 µm
Filtru Aer

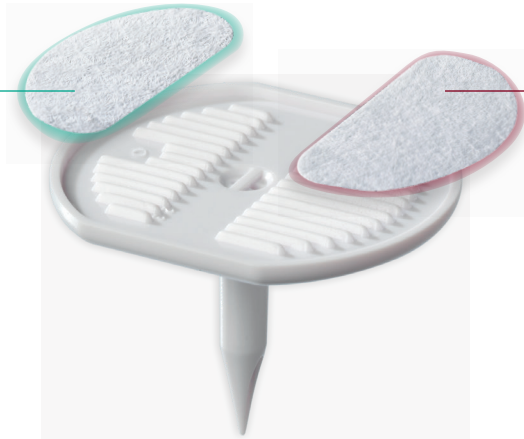

5 µm
Filtru Fluide

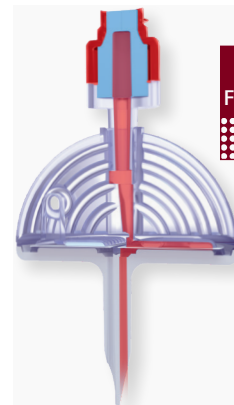

V RETENȚIA AEROSOLILOR
Filtrul de aerosoli din Mini-Spike® 2 Chemo reține total aerosolii încălzați cu medicamente citotoxice și previne eliberarea de material medicamentos.

A&M Labor für Analytik
Abstract report 15-070, 04.2015

VI COMPATIBILITATE CHIMICĂ
Rezultatele testelor confirmă compatibilitatea Mini-Spike® 2 Chemo cu medicamente periculoase.


IUTA Institute
Abstract summary report F17/063,
03.2017



Mini-Spike[®] 2 / Mini-Spike[®] 2 Filter

Pentru o mixare a medicamentelor mai sigură și mai convenabilă.

cu seringă de tip Luer Lock

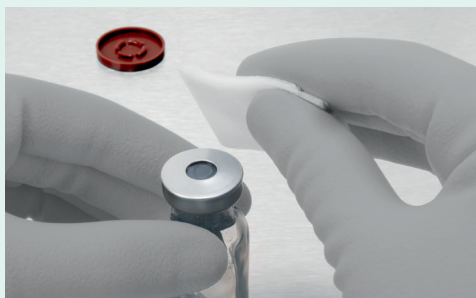

1. Se scoate capatul de protecție al recipientului de medicamente și se dezinfectează dopul conform protocolului instituțional.



2.a Se scoate capatul de protecție al Mini-Spike[®] 2. Se introduce canula de plastic în recipientul cu medicamente prin ținerea plăcii de prindere a Mini-Spike[®] 2.



2.b Se dezinfectează portul de acces înainte de utilizare conform protocolului instituțional.



3. Se conectează seringă care conține diluant, prin portul de acces, cu recipientul cu medicamente în poziție verticală.



4. Se injectează diluantul.
Important: Diluantul din seringă trebuie să fie injectat doar vertical în recipient.




5. Se agită recipientul pentru medicamente conform indicațiilor producătorului pentru a se asigura că soluția este dizolvată în mod corespunzător.




6.a Se întoarce recipientul cu dopul în jos pentru a aspira medicamentul.




6.b Pentru a elimina aerul din seringă, se extrage jumătate din volumul necesar și se lovește ușor seringă inversată. Se împinge pistonul înapoi pentru a elimina aerul, apoi se trage pistonul până la volumul total necesar

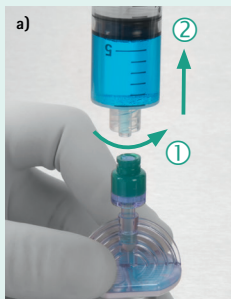

7.a Se deconectează seringă de la portul de acces, cu recipientul pentru medicamente în poziție verticală.

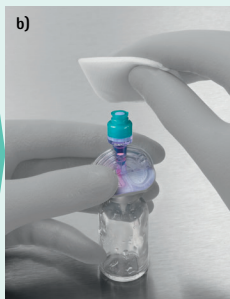

7.b În cazul utilizării multiple a recipientului cu medicamente, se dezinfectează portul de acces conform protocolului instituțional.

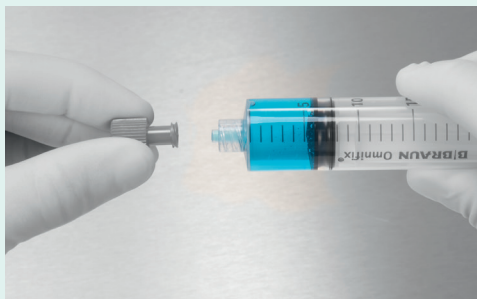

8. Se pune capatul seringii pentru pregătirea transportului.



9. Recipientele cu utilizare multiplă trebuie depozitate într-o poziție verticală. Timpul și condițiile de depozitare pentru recipientele deschise sunt date de producător.



10. A se arunca conform protocolului instituțional.



Mini-Spike[®] 2



Mini-Spike[®] 2 Filter

Beneficii de siguranță

- Reduce riscul de contaminare chimică și microbiologică
- Reduce riscul de contaminare cu particule
- Previne rănilor cu obiecte ascuțite
- Manevrare intuitivă și convenabilă fără ace